



HemaClear®
It Just Fits Better



**Das universelle, sterile,
blutentleerende Tourniquet.
Verbessert die
chirurgische Leistung.
Spart Zeit im Operationssaal.**



- **HemaClear®** ist ein einfaches steriles Tourniquet, das in der orthopädischen- und traumatologischen Gliedmaßenchirurgie verwendet wird.
- **HemaClear®** verdrängt das Blut aus den Gliedmaßen des Patienten, bildet eine Okklusionsstelle und bietet ein steriles Operationsfeld.
- **HemaClear®** besteht aus einem Silikonband und einem sterilen Kompressionsstrumpf, der mit den Griffen über die Gliedmaßen gezogen werden kann.

Bessere Blutentleerung:

Beim Aufrollen des Silikon – Verschlussring wird 95% des gestauten Blutes aus der zu operierenden Stelle verdrängt. Bei der Esmarch Tourniquet sind es nur 69%.

Steriles Umfeld:

HemaClear ist ein steriles, für den einmaligen Gebrauch bestimmtes Tourniquet, bei dem keine kontaminierten, wiederverwendbaren Manschetten verwendet werden und so das Infektionsrisiko gesenkt wird.

Größeres Operationsfeld:

Mit einer Breite von 2,54 cm benötigt HemaClear weniger Platz als herkömmliche Manschetten. Sie erhalten mehr Platz im Operationsfeld.

Einfach und kostengünstig:


Die einfache Anwendung verkürzt die Vorbereitungszeit und der Einsatz von Tourniquet-Maschinen, kontaminierten, wiederverwendbarem Manschetten und Esmarch Binden wird überflüssig.

HemaClear in 3 einfachen Schritten


1 Maßnahmen



Die richtige Größe finden
Die passende Größe zum Umfang

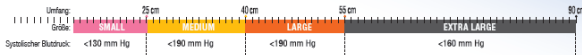

2 Anwendung

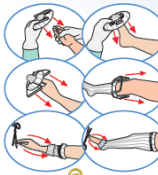

HemaClear über den Finger oder Zeh **rollen**

Die Griffe nach oben **ziehen**, bis zu der Stelle, wo sich normalerweise der unterste Teil des Tourniquets befindet


Untersten Teil abschneiden:
Die Operationsfläche freilegen und den untersten Streifen abschneiden



Anlegen des Tourniquets: Rekordzeit für das Anlegen eines Tourniquets



3 Entfernen

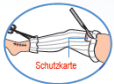


Aufschneiden nach der Operation: Aus Sicherheitsgründen immer die **Schutzkarte** zwischen Kompressionstrumpf und Tourniquet legen




Entfernen des Tourniquets: Rekordzeit für die Verwendung eines Tourniquets

Anwendung HemaClear obere Extremitäten

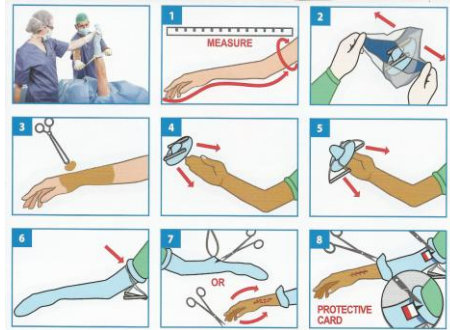

Anwendung HemaClear untere Extremitäten

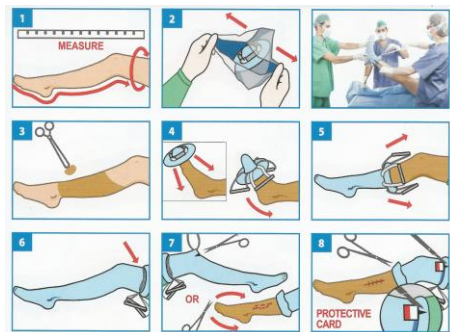

Bei Fragen zur Anwendung zum Produkt und / oder zur Bestellung von nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf!



Artikel	Bezeichnung	Stück pro Pack
PRH-028-PI	HemaClear / 28 – Pink - small	10 Stück
PRH-040-GR	HemaClear / 40 – Green – medium	10 Stück
PRH-040-RE	HemaClear / 40 – Red – medium	10 Stück
PRH-040-YE	HemaClear / 40 – Yellow – medium	10 Stück
PRH-060-BL	HemaClear / 60 – Blue – large	10 Stück
PRH-060-BR	HemaClear / 60 – Brown – large	10 Stück
PRH-060-OR	HemaClear / 60 – Orange – large	10 Stück
PRH-090-BW	HemaClear / 90 – Black/White – xlarge	10 Stück
PRH-032-MA	HemaClear / Model A – Foot & Ankle	12 Stück
PRH-035-FA	HemaClear / Model F – Forearm	25 Stück

Vertrieb in Deutschland durch:



SpongioTech

Gräfenbrücker Straße 37
07570 Weida – Deutschland

Tel.: 036603 / 23 94 12

Fax: 036630 / 23 94 13

Mail: info@spongiotech.de **Web:** www.spongiotech.de